

ALGASIV 30 U INFERIOR

Finas almohadillas que fijan y adaptan la dentadura protegiendo de irritaciones y otras molestias

Calificación: Sin calificación

Precio

12,95 €

12,95 €

2,25 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ALGASIV](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Finas almohadillas que fijan y adaptan la dentadura protegiendo de irritaciones y otras molestias, compuestas por dos capas exteriores de celulosa y una capa interior con dos potentes adhesivos naturales: Polyvox y Alginato Sódico (extracto de algas marinas).

MODO DE EMPLEO

1. Lave profundamente la dentadura y coloque la almohadilla sobre la dentadura.
2. Si la almohadilla es demasiado grande para su dentadura recorte los sobrantes con unas tijeras.
3. Si la almohadilla superior formase pequeñas arrugas contra el paladar, haga un corte en forma de V en la parte trasera, similar al de la parte delantera. Evite recortar demasiado. Cuando más cubra la dentadura mejor será el resultado. Una vez conozca la forma de recortar puede preparar así algunas almohadillas más para futuros usos.
4. Humedezca la almohadilla en agua templada sin empaparla y colóquela sobre la dentadura, alisando las arrugas con el dedo.
5. Colóquese la dentadura sujetándola firmemente unos instantes hasta conseguir la fijación. Si la almohadilla no se sujeta puede ser necesario humedecerla un poco más. Para un buen resultado es conveniente cambiar la almohadilla diariamente.
6. Se quita fácilmente y no deja residuos. Simplemente coja un extremo y tire de ella.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.