

AUDIMER AUDICLEAN TAPONES SOLUCION 12 ML

12 ML

Calificación: Sin calificación

Precio

11,95 €

11,95 €

2,07 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [OMEGA PHARMA](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Reblandece y ayuda a disolver el tapón de cerumen del oído que provoca dificultades de audición, dolor, zumbidos, sensación de taponamiento, sordera eventual después de nadar o ducharse.

Ayuda a mantener la audición.

Reduce la necesidad de usar jeringuillas.

Hidrata el conducto auditivo y suaviza el estiramiento de la piel debido al exceso de cerumen.

COMPOSICIÓN

Agua, aceite vegetal de hueso de albaricoque, aceite esencial de eucalipto glóbulo, emulsionante vegetal suave.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de montaje:

- Desenroscar y retirar el anillo blanco de la botella.
- Quitar y desechar el cierre protector colocado en el anillo.
- Introducir el cuentagotas en el anillo hasta que haga clic.
- Enroscar de nuevo el anillo montado y el cuentagotas en la botella.

Instrucciones:

Agítese antes de usarlo.

- Desenroscar la tapa naranja que cubre la boquilla.
- Con la cabeza inclinada, aplicar Audimer tapones en el oído presionando ligeramente la boquilla de plástico (presionar unas 2-3 veces para aplicarlo en el oído.)
- Mantener la cabeza erguida y dejar actuar durante 25 minutos.
- Se puede utilizar algodón humedecido en la entrada del orificio del oído para ayudar a mantener Audimer tapones en el conducto auditivo.
- Para prevenir que los restos de cerumen se sequen y se endurezcan de nuevo, limpiar con Audimer higiene después de la aplicación.

- Se puede utilizar agua templada aunque, para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar Audimer higiene para el oído.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de dolor o taponamiento persistente en el oído, interrumpir el tratamiento y consultar inmediatamente con su médico.

Consulte a su médico antes de utilizarlo si tiene infección de oído, trastornos del equilibrio, antecedentes de cirugía en el oído, perforación de tímpano, presión en el canal auditivo, un cuerpo extraño en el oído, o si está embarazada o en lactancia materna.

Sólo para uso externo.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.