

COREGA CREMA FIJADORA EXTRA FUERTE 40 ML

Crema fijadora para prótesis dentales con suave sabor a menta

Calificación: Sin calificación

Precio

9,75 €

9,75 €

1,69 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [COREGA](#)

Descripción

Proporciona fijación fuerte durante todo el día.

Su sabor a menta proporciona un frescor inmediato cuando se coloca la prótesis dental sobre la encía.

MODO DE USO:

1. Limpie y seque su prótesis dental.
2. Aplique una pequeña cantidad de fijador COREGA Extra Fuerte en bandas cortas, no demasiado cerca de los bordes de la prótesis dental (véanse los diagramas).
3. Enjuáguese la boca antes de colocarse la prótesis dental.
4. Coloque la prótesis dental en su sitio ejerciendo un poco de presión, sujétela firmemente y muerda durante unos segundos para fijarla.
5. Aplique una vez al día para una fijación segura. Si necesita aplicar más de una vez al día, consulte a su dentista.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.