

FUTURO TERAPIA FRIO / CALOR BOLSA REUTILIZABLE 15 X 33 CELDAS

BOLSA REUTILIZABLE 15 X 33 CELDAS

Calificación: Sin calificación

Precio

17,18 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FUTURO](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Aplicación del frío:

Efecto analgésico y antiinflamatorio por ejemplo en:

- Esguinces.
- Distensiones.
- Contusiones.

Aplicación del calor:

Efecto relajante y que fomenta la circulación sanguínea por ejemplo.:

- Molestias reumáticas.
- Sobrecargas musculares.
- Dolores musculares.

Se adapta de forma óptima a cualquier articulación.

MODO DE EMPLEO

Aplicación y fijación sencilla:

- Según convenga, calentar la bolsa de gel en un baño de agua/microondas o enfriar, en el congelador.
- Colocar la bolsa de gel en la bolsa textil hipoalergénica.
- Ajustar individualmente a la articulación con los cierres rápidos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ponga la bolsa de gel directamente en contacto con la piel para evitar quemaduras/congelaciones.

Puede eliminarse tirándola en la basura doméstica.

La bolsa textil es lavable a mano.

ALERGIA AL LATEX

No se dispone de información sobre su contenido de látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.