

KUKIDENT PRO DOBLE ACCION NEUTRO 60 G

Crema adhesiva en pasta que estabiliza las dentaduras postizas en la boca, para fijación extra fuerte, con efecto sellado anti-residuos

Calificación: Sin calificación

Precio

15,75 €

15,75 €

2,73 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [KUKIDENT](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Crema adhesiva en pasta que estabiliza las dentaduras postizas en la boca, para fijación extra fuerte, con efecto sellado anti-residuos.

COMPONENTES

Sabor neutro: Calcium/Zinc PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum, cellulose gum, petrolatum, silica.

Doble acción: Calcium/Zinc PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum, cellulose gum, petrolatum, silica, CI 45410

MODO DE EMPLEO

Lavar bien las encías y la dentadura. A continuación secar la dentadura

Aplicar en pequeñas bandas. No aplicar demasiado cerca de los bordes.

Coloque la dentadura en su sitio con firmeza y sujétela unos instantes

Espere unos minutos antes de comer o beber

Para evitar que se obstruya la boca del tubo, mantenga el tapón y la boquilla secos. Mantenga fuera del alcance de los niños. No usar en caso de hipersensibilidad a alguno de los ingredientes.

Para una fijación extra fuerte aplicar también en el centro de la dentadura.

Aclarar la boca con agua antes de colocar la dentadura. Está diseñado para reaccionar con la hidratación a una forma de barrera delgada, ajustada y selladora.

ADVERTENCIAS

Al comer o beber:

Evite comida dura o pegajosa y lo que tenga semillas,

Tenga cuidado con comidas muy frías o muy calientes

Los sabores pueden sentirse afectados al principio pero se adaptará rápidamente.

Al masticar y morder:

Haga pequeños mordiscos e intente masticar lentamente y con todos los dientes.

Al hablar y escuchar:

Intente hablar y escuchar delante de un espejo para darle confianza.

Muerda y trague antes de hablar para asegurar que la dentadura esta en la posición correcta.

Puede pensar que hablar distinto, pero los demás no notaran la diferencia.

Al usar dentaduras:

Como cada dentadura es única, puede necesitar varios intentos hasta encontrar la cantidad de crema adhesiva adecuada a aplicar para usted.

Mantenga la boquilla y la tapa limpias y secas para evitar que se obstruyan.

Usar agua templada para limpiar el exceso de crema adhesiva en las encías y dentadura.

Para mejor adaptación, su dentista podría aconsejarle usar la dentadura todo el día durante varios días.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.