

## NARHINEL CONFORT ASPIRADOR RECAMBIO 10 BLANDO DESECHABLE

10 BLANDO DESECHABLE

Calificación: Sin calificación

**Precio**

5,15 €

5,15 €

0,89 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [NARHINEL](#)

Descripción

**ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN**

Eliminación de las secreciones nasales del bebé.

**MODO DE EMPLEO**

Colocar el recambio (A) en el cuerpo central del aparato (B).

Colocar la boquilla de aspiración (C) en tu boca y el extremo del recambio justo en la entrada de unos de los orificios nasales del bebé.

Aspirar suavemente, poco a poco y de forma regular, por la boquilla de aspiración (C).

Si es necesario, entre la aspiración de los dos orificios, retirar las secreciones nasales mediante un pañuelo soplando por la boquilla de aspiración.

Repetir la operación en el otro orificio nasal con el mismo recambio (A).

Quitar el recambio (A) sucio y desecharlo.

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.