

NEXCARE BLOOD STOP 2 U

2 U

Calificación: Sin calificación

Precio

10,95 €

10,95 €

1,90 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[3M](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Algodón natural impregnado de sal sódica / cálcica de celulosa oxidada microdispersa.

Clasificación del producto: Clase I

Absorben la sangre y ayudan a parar las pequeñas hemorragias de la nariz.

Útil en el tratamiento de hemorragias nasales capilares o leves.

Utilizan un material expansible impregnado en polvo hemostático.

Este polvo está realizado con una sal de calcio/sodio de celulosa oxidada microdispersa (m- doc) que interactúa con la sangre de la mucosa nasal creando un coágulo artificial.

Se expande al absorber líquido o sangre rellenando la cavidad nasal. Ésta expansión, combinada con la acción coagulante del m- doc contenido en el tapón nasal ayuda a detener la hemorragia rápidamente.

El tapón humedecido reduce, asimismo, el riesgo de que se repita el sangrado tras su extracción.

MODO DE EMPLEO

Se introduce en la nariz donde se expande absorbiendo la sangre y ayudando a parar la hemorragia nasal.

Retire el tapón del blister e introdúzcalo en la cavidad nasal.

Puede cortar el tapón antes de aplicarlo para adaptarlo al tamaño de la cavidad nasal.

El tapón se expandirá rápida y suavemente como una esponja a medida que absorba la sangre.

Una vez detenida la hemorragia, extraiga cuidadosamente el tapón y deséchelo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Asegúrese de que parte del tapón sobresalga de la nariz para facilitar su extracción.

No empuje demasiado fuerte el tapón al introducirlo.

Producto no recomendado para niños menores de 5 años.

No deje el tapón en la nariz durante un tiempo superior a una hora.
Utilice un tapón únicamente para cada cavidad nasal.
En el caso de hemorragias prolongadas, consulte con su médico.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.