

SINOMARIN ADULTOS LIMPIEZA NASAL 125 ML

125 ML

Calificación: Sin calificación

Precio

12,75 €

12,75 €

2,21 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ITALFARMACO](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Solución de agua de mar hipertónica (2,3% NaCl), rico en ingredientes beneficiosos del mar (sales minerales y oligoelementos).

Acciones:

Alivia la congestión nasal por reducción del edema de la mucosa nasal (vía ósmosis).

Fluidifica las secreciones mucosas.

Ayuda a restaurar la función natural de la mucosa nasal.

Limpia las cavidades nasales de moco acumulado, costras, polvo, restos, contaminantes, alérgenos y agentes infecciosos.

Hidrata la mucosa nasal y alivia la sequedad nasal.

Útil

Para todos los casos de congestión nasal y senos paranasales, por ejemplo, rinitis (infecciosa o alérgica), sinusitis, resfriado común y gripe.

En los casos en los que los medicamentos descongestionantes están contraindicados (por ejemplo, embarazo, lactancia, enfermedad tiroidea, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, diabetes).

Para mejorar la eficacia de los medicamentos descongestionantes y para reducir su uso.

En la profilaxis de las infecciones secundarias ORL y sus complicaciones, como por ejemplo la otitis.

Para promover la recuperación después de una cirugía endonasal.

En la higiene diaria (por ejemplo, en ambientes contaminados).

En ambientes secos.

Producto sanitario

- Sinomarin mini: Clase I. Mercado CE.

- Sinomarin suave Clase IIa.

Mercado CE. ON: 0653

COMPOSICIÓN

Solución de agua de mar hipertónica (2,3% NaCl), rico en ingredientes beneficiosos del mar (sales minerales y oligoelementos).

Contiene agua de mar 70%, agua purificada 30%, equivalente a 23 g/L de NaCl (2,3%). Sin conservantes. Sin medicamentos. Sin aditivos químicos. 100% natural

MODO DE EMPLEO

Modo de empleo: de 1 a 3 pulverizaciones en cada fosa nasal, 2 a 3 veces al día, o según las instrucciones del médico.

Adultos y niños

Sostenga el spray en posición vertical y pulse unas cuantas veces para activar la aspersion.

Suéñese la nariz para eliminar toda la mucosidad antes de usar Sinomarin®.

Retire la tapa protectora.

Doble el cuello con suavidad hacia delante sobre un lavabo y la cabeza inclinada hacia la derecha.

Introduzca suavemente el aplicador en la fosa nasal izquierda en paralelo a la nariz y presione firmemente.

Gire la cabeza hacia el lado opuesto, y repita la aplicación en la otra fosa nasal.

Retire el aplicador del orificio nasal, regrese a la posición vertical al tiempo que permite a la solución actuar durante unos segundos; luego suéñese la nariz.

Repita el procedimiento si es necesario.

Lave el aplicador con agua tibia y séquelo después de cada uso.

Bebés y niños que requieren ayuda

Sostenga el spray en posición vertical y rocíe unas cuantas veces para activar la aspersion.

Limpie la nariz del niño antes de usar Sinomarin®.

Retire la tapa protectora.

Coloque al bebé en posición boca arriba, girando su cabeza hacia la derecha.

Introduzca suavemente el aplicador en la fosa nasal izquierda en paralelo a la nariz y presione firmemente.

Gire la cabeza hacia el lado opuesto, y repita la aplicación en la otra fosa nasal.

Retire el aplicador de la fosa nasal del bebé, coloque al bebé en posición inicial al tiempo que permite que la solución actúe durante unos segundos y luego limpie la nariz o utilice un dispositivo de aspiración para eliminar la mucosidad.

Repita el procedimiento si es necesario.

Lave el aplicador con agua tibia y séquelo después de cada uso.

Sinomarin® Adultos y Sinomarin® ORL de 1 a 3 pulverizaciones en cada fosa nasal, 2 a 3 veces al día, o según las instrucciones del médico.

Sinomarin® Niños: de 1 a 2 pulverizaciones en cada fosa nasal, 2 a 3 veces al día, o según las instrucciones del médico.

Puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No realizar nunca el lavado de las fosas nasales con la cabeza inclinada hacia atrás para evitar que el líquido descienda por la garganta.

Solo para uso nasal. No utilice el mismo aplicador nasal para más de una persona. No utilice el envase pasada la fecha de caducidad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Conservar por debajo de 25 °C. Envase a presión. Proteger de la luz solar y de fuentes de calor. No lo exponga a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni incinerar el envase, incluso vacío.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.