

TENSIOMETRO DIGITAL VISOMAT HANDLY DE MUÑECA

Medición de la toma de la tensión arterial en el brazo

Calificación: Sin calificación

Precio
65,00 €

65,00 €

11,28 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [LA ROCHE POSAY](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Acción: medición de la toma de la tensión arterial en el brazo.

Totalmente automático.

Pantalla digital de tamaño grande.

Memoria de valores medidos para 30 tomas.

Mando por botón único.

Con estuche.

MODO DE EMPLEO

Condiciones del paciente:

- Evitar ejercicio físico previo.
- Reposo durante 5 minutos antes de la medida.
- Posición adecuada (evitar actividad muscular isométrica): sedestación, espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla y brazos apoyados a la altura del corazón, piernas no cruzadas.
- Evitar medir en casos de disconfort, vejiga llena, etc.
- Ambiente tranquilo y confortable. Relajación previa a la medición.
- Reducir la ansiedad o inquietud en la medida de lo posible.
- Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar.
- Evitar consumo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos y síntomas (p. ej. dolor) o agitación psíquica / emocional.

Medición:

- Seleccionar el brazo con PA más elevada, si lo hubiese

- Ajustar sin holgura y sin que comprima
- Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman
- El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arteria braquial
- El manguito debe quedar a la altura del corazón; pero no así el aparato, que debe ser bien visible para el explorador
- Seguir las instrucciones del fabricante
- De forma general, se requiere encender el esfigmomanómetro y proceder a la realización de la medida presionando el botón indicado para tal fin
- Esperar a finalizar la lectura y registrar la misma en la hoja apropiada.

OTROS

Consejos para una toma de presión correcta:

Es importante efectuar la toma de manera correcta para obtener valores exactos.

Siéntese en la posición adecuada en una silla y ponga los brazos sobre la mesa. Si la muñeca no se encuentra a la altura del corazón, no se obtendrá un valor correcto. Relájese los hombros y el brazo, y efectúe la toma en una postura natural.

Es importante efectuar la toma en casa y anotar los valores obtenidos, cada día a la misma hora; así, se puede averiguar la tendencia de su presión. Su médico diagnosticará los resultados, para aconsejarle en cuanto al cuidado de su salud.

Como la postura de toma y el grosor de los vasos sanguíneos son diferentes en la toma en la muñeca, el valor puede variar ligeramente con respecto a la toma en el brazo.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.