

TERMOMETRO FRONTAL INFRARROJOS

Calificación: Sin calificación

Precio

78,50 €

78,50 €

13,62 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [NOVICO MEDICA](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Termómetro frontal de infrarrojos para tomar la temperatura corporal, uso frontal.

Puede medirse la temperatura tras el lóbulo de la oreja en caso de que la frente presente sudor.

Alcanza la temperatura máxima en 3 segundos.

La parte externa de la sonda puede limpiarse con un paño suave humedecido en agua o alcohol.

Se suministra con una batería de litio que deberá ser reemplazada cuando el aparato se lo indique en la pantalla de cristal líquido.

Marcado CE nº 0120

No estéril.

MODO DE EMPLEO

Posicionar la sonda en el centro de la frente en contacto firme con la piel. Presionar el botón de puesta en marcha y no soltar hasta la finalización de la medida.

Mover lentamente el termómetro desde el centro de la frente hasta un extremo lateral, manteniendo siempre el instrumento en contacto firme con la piel. El recorrido debe durar de 3 a 5 segundos y el termómetro deber permanecer siempre perpendicular a la frente.

Durante la medición escuchará una señal sonora cada 0,5 segundos para ayudarle a controlar el tiempo de medida. Al acabar, deje de presionar el botón y lea el valor de la temperatura.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si hay sudor en la frente, puede tomar la temperatura detrás del lóbulo de la oreja. Normalmente no es una medida exacta, pero en estos casos puede ser suficientemente indicativa.

No sumergir en agua o cualquier otro líquido.

Guardar a temperatura ambiente (min 10°C- max. 40°C)

Si el termómetro ha estado sometido a temperaturas fuera del rango expuesto anteriormente, debe dejarse 30 min. a temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.