

## THERMACARE CUELLO HOMBROS Y MUÑECAS 6 PARCHES

Tratamiento térmico para aliviar el dolor

Calificación: Sin calificación

**Precio**

12,95 €

12,95 €

2,25 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [PFIZER](#)

Descripción

### DESCRIPCIÓN

ThermaCare parches térmicos utiliza la terapia térmica (calor) para dilatar los vasos sanguíneos de los músculos y articulaciones. Al dilatarlos el flujo sanguíneo de la zona afectada se incrementa, aportando oxígeno a las células dañadas y activando la regeneración muscular.

El calor ayuda a relajar los músculos y estimula los termorreceptores de la piel reduciendo así la sensación de dolor.

Están específicamente diseñados para la zona del cuello, hombros y muñecas.

### MODO DE EMPLEO

- No abra la bolsa protectora si no va a utilizar ThermaCare, puede tardar hasta 30 minutos en alcanzar la temperatura terapéutica necesaria.
- Retire el papel de uno de los extremos, dejando la cara adhesiva al descubierto.
- Coloque sobre la zona a tratar la parte del parche con células térmicas.
- Retire el papel del otro extremo y presione con firmeza.
- Se recomienda dejar puestos los parches térmicos durante 8 horas.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.